

EXAMVISION™



Grattis till din personligt
tillverkade lupp



Innehåll

Inledning	3
Kvalitetskontroll, finjustering och videor	
Galilean HD & Essential	4
Kepler Kompakt	6
Kepler Advanced	8
Garanti	10
Tillbehör till ExamVision-luppar	11
Symboler och instruktioner för korrekt användning	14



Inledning

Du har valt ett högkvalitativt precisionsverktyg, skräddarsytt för dina mått. Om du behöver justera din lupp, tänk då på att den är ett komplext precisionsinstrument, så följ videohandledningen noga – eller be din lokala ExamVision-leverantör för hjälp.

ExamVision kan justera arbetsavståndet på din lupp och uppgradera ordinerade linser när din syn förändras över tid. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta din ExamVision-återförsäljare.

Din lupp har tillverkats med noggrannhet, exakt enligt dina specifikationer och vi hoppas att du är 100 procent nöjd.



Kvalitetskontroll, finjustering och videor





Galilean HD & Essential

Innan du börjar använda din nya lupp, se ExamVision-videorna för att säkerställa rätt passform och syn.

Vi har ställt in din lupp enligt ditt önskade arbetsavstånd från framför dina ögon till objektet. Det här avståndet är angett på det Kvalitetskort som bifogas din nya lupp.

Titta på vår video *“Does your loupe fit correctly?”* för optimal klar syn, komfort och perfekt passform. Detta säkerställer rätt höjd och vinkel på luppen, vilket visas nedan:

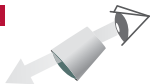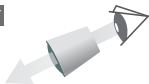

Videoer

Du hittar ExamVision-videoer på vår kanal på YouTube och Vimeo. För att titta behöver du bara skanna QR-koden här:





Kvalitetskontroll, finjustering och videor



Kepler Kompakt

Innan du börjar använda din nya lupp, se ExamVision-videorna för att säkerställa rätt passform och syn.

Vi har ställt in din lupp enligt ditt önskade arbetsavstånd från framför dina ögon till objektet. Det här avståndet är angett på det Kvalitetskort som bifogas din nya lupp.

Du måste finjustera din Kepler Kompakt för ett öga i taget, på ditt arbetsavstånd. Fixera din optimala fokusinställning med den medföljande insexnyckeln. Titta på vår video *"Fitting your Kepler Kompakt loupe"* för optimal klar syn, komfort och perfekt passform. Detta säkerställer rätt höjd och vinkel på luppen, vilket visas nedan:



Videor

Du hittar ExamVision-videor på vår kanal på YouTube och Vimeo. För att titta behöver du bara skanna QR-koden här:





Kvalitetskontroll, finjustering och videor



Kepler Advanced

Innan du börjar använda din nya lupp, se ExamVision-videorna för att säkerställa rätt passform och syn.

Vi har ställt in din lupp enligt ditt önskade arbetsavstånd från framför dina ögon till objektet. Det här avståndet är angett på det Kvalitetskort som bifogas din nya lupp.

Du måste finjustera din Kepler Advanced för ett öga i taget, på ditt arbetsavstånd. Titta på vår video "*Fitting your Kepler Advanced loupe*" för optimal klar syn, komfort och perfekt passform. Detta säkerställer rätt höjd och vinkel på luppen, vilket visas nedan:



Videor

Du hittar ExamVision-videor på vår kanal på YouTube och Vimeo. För att titta behöver du bara skanna QR-koden här:



Garanti

5 års tillverkningsgaranti

- Galilean HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Observera att vår garanti inte täcker defekter orsakade av normalt slitage, missbruk, försummelse, oavsiktlig skada, modifiering, frakt i icke-originalförpackningar eller fel på grund av felaktig montering, underhåll, service eller rengöringsprocedurer.

Vid fel, returnera enheten till din ExamVision-återförsäljare för reparation.

Se äve: examvision.com/warranty



Tillbehör till ExamVision-luppar



Näsdynor

Klara näsdynor i silikon i olika storlekar.



Halsrem

Fin men slitstark rem för extra säkerhet när du bär dina lappar - med silikonfästen.



Kabelklämma

Fäst kabelklämman på skalmarna på dina lappar och tryck LED-kabeln försiktig in i hållaren.



Rengöringslösning (alkoholfri)

Vår anpassade rengöringslösning håller din lupp i perfekt skick. Använd en liten mängd på en linstrasa i mikrofiber för att säkert avlägsna smuts, damm och fett.

Tillbehör till ExamVision-luppar



Desinfektionsdukar (alkoholfria)

Våra desinfektionsdukar håller din lupp i perfekt skick. Dessa engångsrengöringsdukar är ett snabbt och lätt sätt att säkert avlägsna smuts, damm och fett.



Visionshield (storlek L, XL och MAX)

Skyddar luppen och ditt ansikte från stänk och smuts. Fästes enkelt på ExamVision-luppar med en kardborreadapter. Storlek L passar Galilean HD och Essential-luppar – och storlek XL passar Kepler-luppar. Dessa versioner har en utskärning i visiret för en pannlampa.

Visionshield MAX är ett heltäckande visir som enkelt fästs på och passar alla ExamVision-luppar, som en del av din arbetsrutin.

ExamVision Visionshields är tillverkade av flisfri, flexibel plastfilm som enkelt kan rengöras, desinficeras och återanvändas.



Sideshields

Nästan osynliga, fjäderlätta sidoskydd skyddar ögonen från stänk och skräp. För engångsbruk i sats om tre par.



Juveler

Om total anpassning inte är tillräckligt, varför inte lägga till en diamanter? En diamanter på 0,02 karat (1,7 mm) inbäddad i en sterlingsilvernål, handgjord av en dansk smyckedesigner för att förbättra din vackra Icon-ram. Rubiner och safirer finns också tillgängligt. Vi gör den perfekt. Du gör den personlig.



Färgade skalmspetsar

Allergifria skalmspetsar för en personlig touch och bekväm passform. Tillverkade av konstgummi.

Tillgängliga i en mängd färger.

Hela listan med tillbehör hittar du på:
examvision.com/loupes-lights/accessories/



Symboler och instruktioner för korrekt användning



Tillverkare

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denmark.
www.examvision.com



eRFU Indicator

Se bruksanvisningen

För digitala versioner på olika språk, följ denna länk:
examvision.com/support



Försiktighet. Korrekt användning och underhåll

Din ExamVision-lupp är ett precisionsinstrument. Som med alla kvalitetsprodukter behövs rätt skötsel för att hålla din lupp i toppskick. Vid normal daglig användning behöver din lupp servicekontroller emellanåt. Inspektera regelbundet. Om du upptäcker slitage eller skador, om din lupp känns lös eller inte passar lika bra som när den var ny, ska du sluta använda den och kontakta din ExamVision-återförsäljare omedelbart för service och reservdelar. Din lokala optiker kan även hjälpa dig med mindre justeringar eller åtdragning av skruvar. Du får INTE ändra eller modifiera din lupp.

Allergier

ExamVision använder enbart högkvalitativa, allergitestade glasmaterial. Din lupp måste passa så att enbart näsdynan och skalmspetsarna vidrör din hud. Om irritation ändå osannolikt skulle uppstå, kontakta din ExamVision-återförsäljare.

Underhåll och rengöring

Använd INTE alkohol för rengöring. Använd endast alkoholfria rengörings- och desinfektionsprodukter som rekommenderas av ExamVision och en mjuk luddfri trasa. Använd INTE autoklaver eller rengöringsmetoder med ultraljud. Använd INTE UV-koncentrerade desinficeringsmetoder.

**Skydda mot solljus**

Lämna inte luppglasen direkt i solen. Förstoringen kan skapa en "hot spot" som kan orsaka en brand.

**Förvaras torrt****Ömtåligt, hanteras varsamt****Använd inte om förpackningen är skadad**



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com